

SIGNATERA™ MINTAVÉTEL A GYAKORLATBAN

TUMORMINTA BEKÜLDÉSE

- ☐ **Reprezentatív FFPE blokk esetén** (műtéti blokkból kiválasztva vagy 3-5 core biopszia esetén):
 - >5x5 mm (25mm²) tissue surface area
 - min 60um tumorvastagság
 - min 30% tumortartalom
 - + szükséges plusz 1db H-E metszet
- ☐ Ha csak **slide** áll rendelkezésre:
 - 6-10 db 10um-es festetlen slide
 - VAGY 12-20 db 5um-es festetlen slide
 - + ebben az esetben is szükséges 1 db H-E metszet
- ☐ **Minta Szelekció:**
 - friss minta kiújulásból > eredeti primer tumor
 - metasztázis > primer tumor > nyirokcsomó áttét
 - műtéti rezekátum > biopszia
 - kezelés előtti > kezelés utáni minta neoadjuváns kezelés esetén

VÉRMENTA BEKÜLDÉSE

- ☐ **21G tűvel, perifériás vénából:**
 - 1 db EDTA
 - 2 db Streek-CellFreeDNABCT (6C-37C-ig, 7 napig tárolható, szobahőn kezelhető, szállítható)
- ☐ **Mintavétel időzítése**
 - Posztoperatív minta: **műtét után 2-4 hét**
 - Adjuváns kezelés idején: **pretreatment laborokkal**
 - Neoadjuváns kezelés idején: **pretreatment laborokkal**
 - Follow-up során:
 - 1. évben: **3 havonta**
 - 2. évtől: **6 havonta**, 24-60. hóig
 - Metasztatikus páciensek esetén terápiás válasz mérésére: physician choice, általában minden ciklusban (korai immunterápiás válasz) vagy minden 3. ciklusban, képalkotóval összehangolva, pretreatment laborokkal

